



1

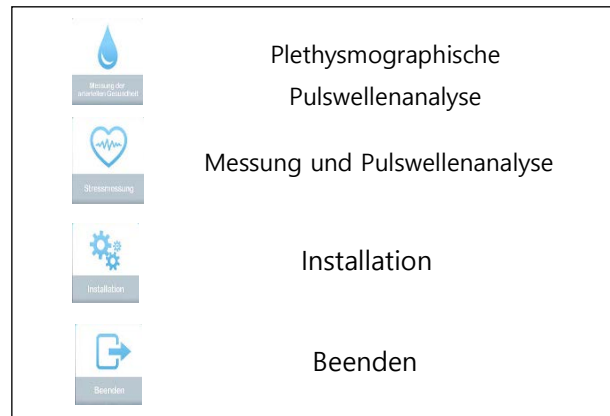


2

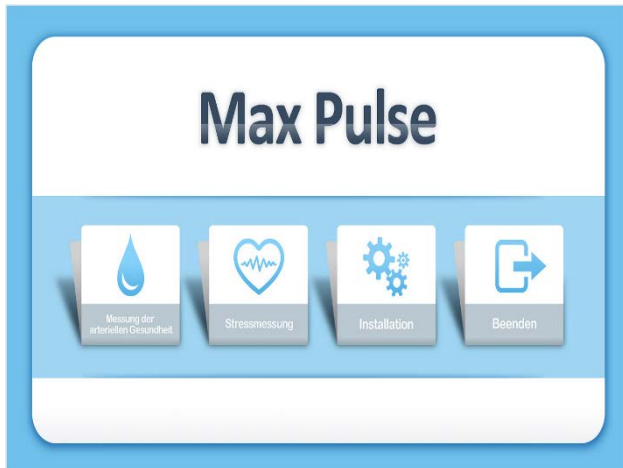


1. Bei Installationsbildschirm Wählen Sie Sprache, Testzeit (3 Min. / 5 Min.), Referenztyp (Asia, West), Benutzername und Telefonnummer
2. Kommentar- Eingabemodus
 - F8** : Zur direkten Eingabe des Kommentars
 - F9** : Zur automatischen Generierung des Kommentars

3

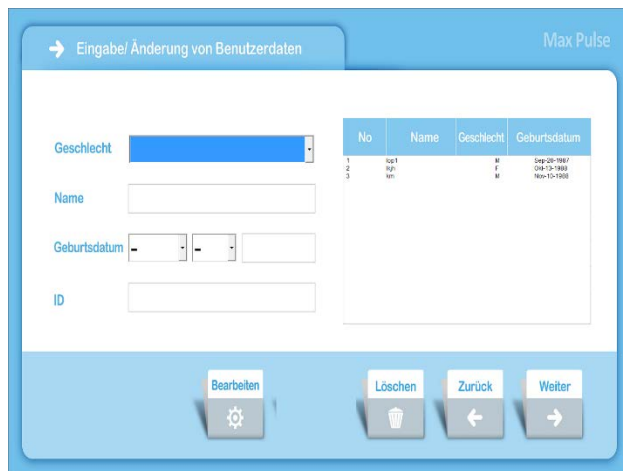


3. Wenn Sie auf "Plethysmographische Pulswellenanalyse" oder "HRV und Pulswellenanalyse" klicken, werden die Benutzerdatenfelder oder die Speicherliste angezeigt
4. Für neue Patienten bitte die Eingabe von Benutzerinformationen (auch ID !), oder die Auswahl der bekannten Patienten aus der Patientenliste

4

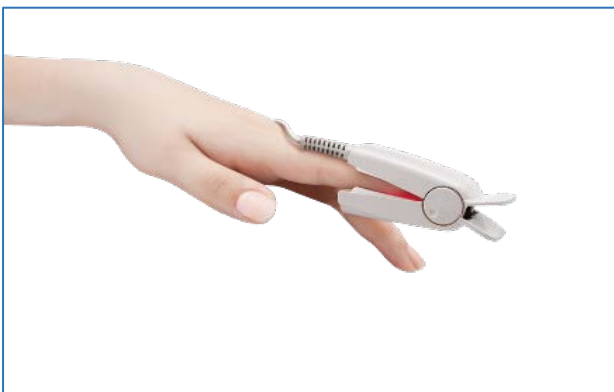

- Setzen Sie den Sensor auf den Zeigefinger der linken Hand.
- Die beste Position des Sensors ist die Herzhöhe im Sitzen oder im Liegen die Untersuchungshand auf die Brust.
- * Maniküre beeinflusst den Test, also muß sie vor der Messung beseitigt werden ***

5

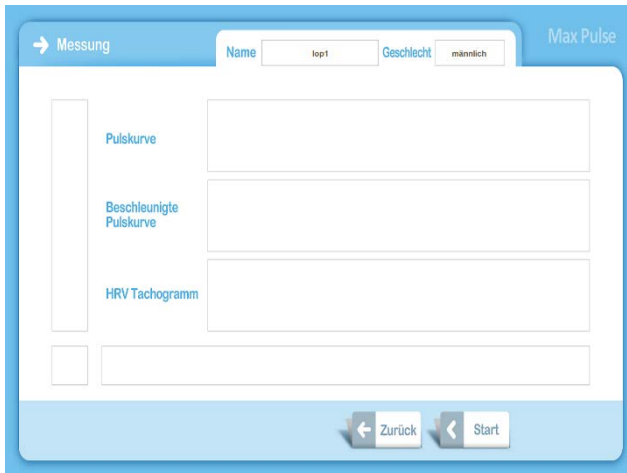

5. Nach der Benutzerregistrierung klicken auf das Symbol



und dann sind ist man auf der Messungsebene.

Mit dem klicken auf  startet die Messung.

*** Während der Messung nicht bewegen oder sprechen***

6



➔ APG (45sec) Bericht

6. Nach der Messung ist man auf der Ergebnisebene. APG führt zu PWV (45 sec-Messung). Kombinationsergebnis HRV + PWV nach 3 oder 5 min.

7. Klicken Sie auf das Symbol "Drucken", um jedes Ergebnis auszudrucken.

8. Im Falle des direkten Eingabemodus vom Kommentar (F8), nach Eingabe eines Kommentars in das Feld APG-Bericht, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um das Fragefeld zu öffnen.

9. Klicken Sie auf "Ja", um einen Kommentar zu speichern.

(C:\WMEDICORE\MaxPulse_General\Share\)

Das Ergebnis wird automatisch durch den Pfad im Excel-Format gespeichert.

[Dateiname]

ID_ Benutzername_Datum_HRV.xls

ID_ Benutzername_Datum_APG.xls



➔ HRV & APG Bericht

(Messung von Stress und arteriellen Gesundheit)